



BAÑOS PARA OSTOMIZADOS

WWW.LHC1.NET

BAÑOOSTOMIZADOS.COM

INFO@LHC1.NET

BAÑOS PARA OSTOMIZADOS



MODELO

EMPTYME®



MODELO

BAÑOOSTOM®

Nuestros baños cuentan con el respaldo de la **FAPOE** (Federación de Asociaciones de Ostomizados de España) en cuanto cumplen con la **NORMATIVA** indicada por la **Comisión de Acceso Universal** del **CERMI** (**Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad**) y de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, **COCEMFE**.

En las **CORTES GENERALES**, **DIARIO DE SESIONES**, **SENADO**, **XIV LEGISLATURA**, día 13 de octubre de 2021 **se aprobó por unanimidad** la moción en relación a los **BAÑOS ADAPTADOS A OSTOMIZADOS** (Expediente 661/000747, a partir de la página 22).



BAÑOS PARA OSTOMIZADOS

WWW.LHC1.NET

BAÑOOSTOMIZADOS.COM

INFO@LHC1.NET





BAÑOS PARA OSTOMIZADOS

WWW.LHC1.NET

BAÑOOSTOMIZADOS.COM

INFO@LHC1.NET

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y VENTAJAS

- **GABINETE EN “SOLID SURFACE”**

El **gabinete completo** está fabricado con un material compuesto sintético denominado “**Superficie Sólida**” (**Solid Surface**), diseñado específicamente para uso sanitario y con propiedades antibacterianas. Esto garantiza una alta higiene, facilidad de limpieza, estructura robusta y resistente, además de juntas invisibles, uniformidad en el color y flexibilidad para realizar ajustes de medidas personalizadas.

(NO está hecho de HPL sobre aglomerado, paneles laminados, ni de fibra de vidrio, que pueden causar irritación y problemas de toxicidad, o que se deforman con la humedad).

- **INODORO EN CERÁMICA / VACIADOR CON SIFÓN**

Para evitar el retorno de olores tras tirar de la cisterna (vaciador de la bolsa). Está colocado a la altura de **750 mm** desde el suelo. La altura del inodoro está calculada adecuada para vaciar y enjuagar la bolsa.

- **CISTERNA OCULTADA DENTRO DEL GABINETE**

El bastidor con la cisterna empotrada está externo a la pared, oculto dentro del gabinete. **NO** se necesitan obras de albañilería. Solo se necesitan las conexiones de toma de agua y el drenaje, que son estándar.

- **ENCIMERA**

La encimera está colocada a la altura de **750 mm** desde el suelo, encastrando al inodoro, para colocar los productos necesarios para el cambio del dispositivo. Está al mismo nivel que el inodoro y así evitar caída de los productos al pavimento. Con un ancho de **725 mm** diseñado para tener suficiente superficie de apoyo para el material de reemplazo.

- **PULSADOR NEUMÁTICO REMOTO**

La operación de descarga de agua de la cisterna empotrada se activa por medio de un pulsador neumático remoto para 3 o 6 litros de agua por descarga. Está colocado en la parte frontal de la encimera porque sea fácil de alcanzar.

- **GRIFERÍA / ENJUAGADOR DE BOLSA CON CABLE EXTENSOR**

Nuestro modelo se puede utilizar con una sola mano, ya que la otra sujeta la bolsa. No hay problema incluso si solo fuera posible conectarse a agua fría: en algunos casos, si el agua está demasiado caliente, se puede dañar el estoma. El diámetro de la boquilla de la ducha **NO** supera los **25 mm** (35 mm es la medida de ancho boca bolsa de ileostomía).

- **ESPEJO GRANDE**

Situado frente al usuario a ras del inodoro para una vista completa al cambiar la bolsa. Éste no tiene el pulsador de descarga de la cisterna en el medio, ni ningún accesorio, que dificulte la visualización del estoma.

- **PORTARROLLOS PAPEL HIGIÉNICO**

Puede ser situado al lateral, a una altura cómoda.

- **DISPENSADOR JABÓN**

Puede ser colocado de lado a una altura cómoda.

- **2 GANCHOS PARA COLGAR**

Cercanos al inodoro o zona de cambio, práctico como colgador de enseres/prendas.

- **COLOCACIÓN / DIMENSIONES**

El gabinete del inodoro está semi-separado, solo fijado a la pared, y se puede fácilmente colocar en un espacio abierto. Las **dimensiones** muy compactas del kit aseo son:

- 725 mm de ancho x **640 mm** de profundidad x 1645 mm de largo (MODELO **GRANDE**)

- 725 mm de ancho x **540 mm** de profundidad x 1645 mm de largo (MODELO **PEQUEÑO**)



BAÑOS PARA OSTOMIZADOS

WWW.LHC1.NET

BAÑOOSTOMIZADOS.COM

INFO@LHC1.NET

EMPTYME®

BAÑO PARA OSTOMIZADOS

SUMINISTRO MATERIALES BAÑO ADAPTADO A OSTOMIZADOS

· **TODO el gabinete completo** está fabricado con material compuesto sintético “**Superficie Sólida**” (*Solid Surface*) de uso sanitario y antibacteriano, para garantizar higiene, limpieza fácil, construcción sólida y resistente, juntas invisibles, uniformidad del color y versatilidad en ajustes de medidas personalizadas.

(NO en HPL sobre aglomerado, tablero aplacado, NO en fibra de vidrio que puede causar irritación y toxicidad, u otro material no adecuado, que se hincha con la humedad).

- El ancho está diseñado para tener suficiente superficie de apoyo para el material de reemplazo.
- La altura del mostrador de la encimera es calculada adecuada para vaciar y enjuagar la bolsa.
- Hay un inodoro integrado de cerámica y la operación de descarga es con un controlador neumático remoto para 3 o 6 litros de agua.
- El controlador se coloca en la parte frontal de la encimera para facilitar el acceso.
- El kit incluye:
 - Mueble realizado **enteramente** con material sintético **Solid Surface** (igual al de los gráficos, fotos y planos facilitados) - **kit de 2 piezas** (top y base pie)
 - Cisterna empotrada
 - Bastidor para la cisterna empotrada
 - Pulsador remoto para cisterna empotrada
 - Taza de inodoro suspendido
 - Enjuagador / Grifo especial con ducha extraíble (opcional)
 - Espejo grande
 - Piezas especiales de montaje
 - Dos ganchos
 - Dispensador de jabón
 - Portarrollos de papel higiénico

GABINETE: El inodoro está semi-separado, solo fijado a la pared y se puede colocar en un espacio abierto. El kit de montaje debe ser instalado por personal cualificado.

La instalación y el montaje están excluidos.




BAÑOS PARA OSTOMIZADOS

WWW.LHC1.NET

BAÑOOSTOMIZADOS.COM

INFO@LHC1.NET

FICHAS TÉCNICAS

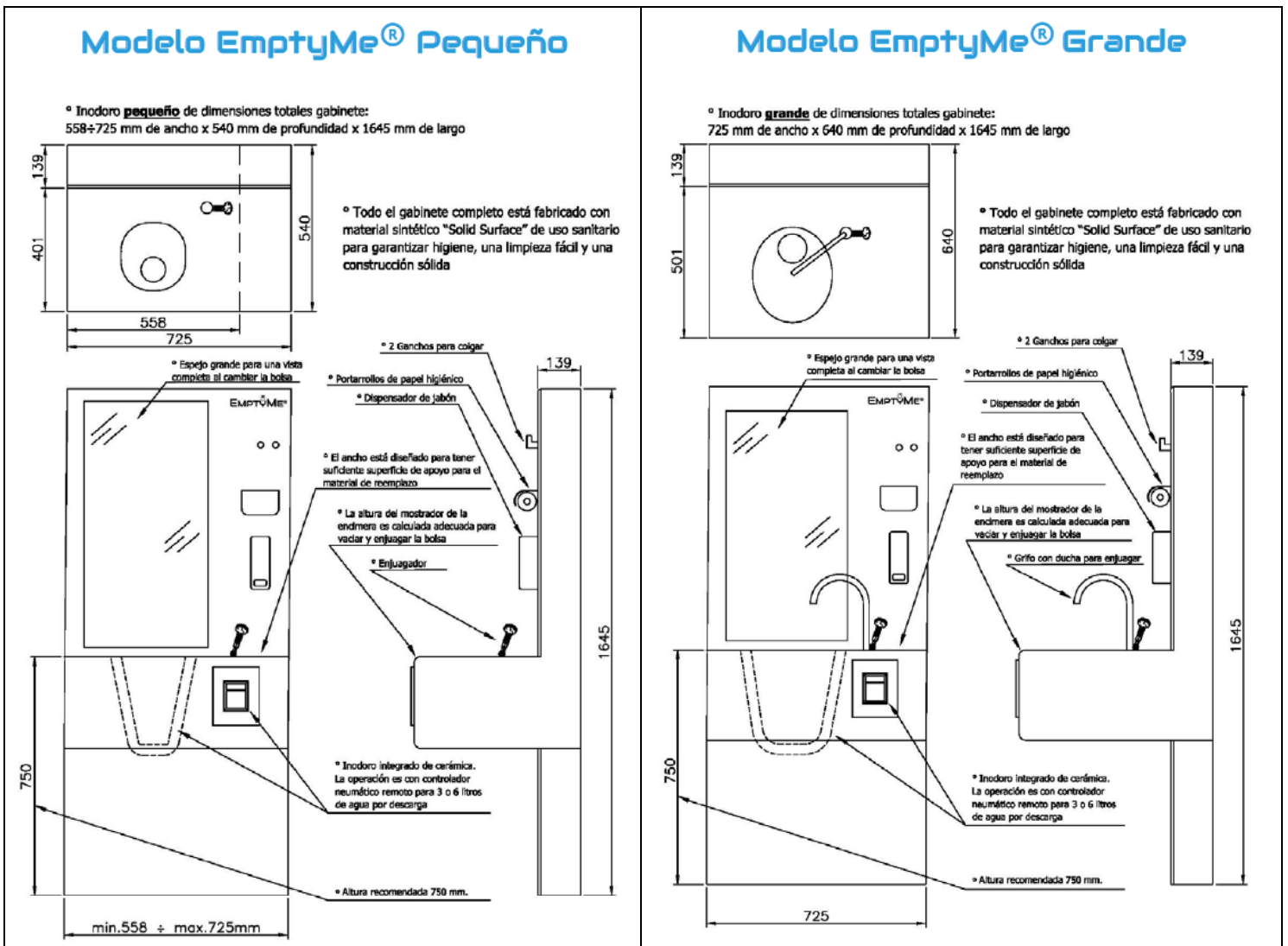

Se pueden evaluar ajustes de medidas, siempre y cuando sea posible, sin penalizar aspectos fundamentales, imprescindibles para el uso correcto del baño adaptados a personas ostomizadas.

La encimera con inodoro está colocada a la altura de **750 mm** desde el suelo.



OFICINA PROPIEDAD INTELECTUAL UNIÓN EUROPEA - Registro Dibujos y Modelos Comunitarios EUIPO

- CERTIFICATE OF REGISTRATION / Concesión 015019294-0001 BañOstom® Grande
- CERTIFICATE OF REGISTRATION / Concesión 015019295-0001 EmptyMe® Grande
- CERTIFICATE OF REGISTRATION / Concesión 015019296-0001 BañOstom® Pequeño
- CERTIFICATE OF REGISTRATION / Concesión 015019297-0001 EmptyMe® Pequeño
- CERTIFICATE OF REGISTRATION / Concesión 015014307-0001 GRIFO EmptyMe®



BAÑOS PARA OSTOMIZADOS

WWW.LHC1.NET

BAÑOOSTOMIZADOS.COM

INFO@LHC1.NET





BAÑOS PARA OSTOMIZADOS

WWW.LHC1.NET

BAÑOOSTOMIZADOS.COM

INFO@LHC1.NET

BAÑOOSTOM[®]

BAÑO PARA OSTOMIZADOS





BAÑOS PARA OSTOMIZADOS

WWW.LHC1.NET

BAÑOOSTOMIZADOS.COM

INFO@LHC1.NET

VENTAJAS DE ELEGIR EL ASEO BAÑOSTOM®

EL ASEO BAÑOSTOM®, ES LA MEJOR OPCIÓN PORQUE:

- El **gabinete completo** está fabricado con un material compuesto sintético denominado “**Superficie Sólida**” (**Solid Surface**), diseñado específicamente para uso sanitario y con propiedades antibacterianas. Esto garantiza una alta higiene, facilidad de limpieza, estructura robusta y resistente, además de juntas invisibles, uniformidad en el color y flexibilidad para realizar ajustes de medidas personalizadas.
(NO está hecho de HPL sobre aglomerado, paneles laminados, ni de fibra de vidrio, que pueden causar irritación y problemas de toxicidad, o que se deforman con la humedad).
- El aseo BañOstom® es **lo que los ostomizados necesitan**. Está diseñado bajo sus directrices y consejos. En BañOstom® les hemos escuchado para atender todas sus necesidades con éxito. Especialmente hemos puesto atención en **minimizar la distancia** entre el inodoro y el borde de la encimera de manera que la bolsa pegada a el estoma pueda ser vaciada sin dificultad.
- Para montar e instalar el aseo de BañOstom® **no hay que hacer obras**: tan solo hace falta conectarlo a la entrada de agua y a la salida de aguas residuales.
- El kit incluye un **manual de instrucciones completo y detallado** con fotos y dibujos. El montaje e la instalación no suponen dificultades, tanto si son realizados por empresas externas de fontanería como si son de propios servicios de mantenimiento interno. En cualquier caso, nosotros siempre estaremos a su disposición para ayudar, asistir y asesorar al fontanero y para contestar a cualquier duda que le pudiera surgir.

Los aseos BañOstom® solucionan todos los problemas a los que los ostomizados se enfrentan cada día por no disponer de baños adaptados en casi ningún lugar. Con los aseos de BañOstom® los ostomizados pueden normalizar sus vidas en los lugares en los que se encuentran.





BAÑOS PARA OSTOMIZADOS

WWW.LHC1.NET

BAÑOOSTOMIZADOS.COM

INFO@LHC1.NET

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y DE DISEÑO BAÑOOSTOM®



- **ALTURA:** La encimera con inodoro está colocada a la altura de **750 mm** desde el suelo. Con lo que para vaciar la bolsa no hay que agacharse ni arrodillarse. **Está diseñado para usarse en una postura saludable y evitar lesiones de espalda o de rodillas.**

- **INODORO:** el váter del servicio de BañoOstom®, es de cerámica y lo suficientemente **grande y profundo para no mancharse mientras se vacía la bolsa**, su profundidad y tamaño evitan las salpicaduras. Además, está encastrado en una encimera con formas redondeadas de gran elegancia.



- **CISTERNA:** el aseo de BañoOstom® tiene la **cisterna oculta dentro del propio mueble del baño**, de esta forma **no hay que hacer obras de albañilería** para su instalación. Tan solo será necesario contar con conexiones de toma de agua y salida de aguas residuales, que son estándar. La cisterna se acciona mediante el pulsador neumático remoto colocado en el frontal del mueble. Permite dos tipos de descarga: de 3 y 6 litros de agua.
- **ENJUAGADOR:** el aseo de BañoOstom® cuenta con un **enjuagador de bolsa** (ducha de mano de pequeño calibre conectada a un cable de ducha) que se acciona con el pulgar de la mano para **poder enjuagar la bolsa tras el vaciado**, mientras con la otra mano se sujeta la bolsa. El diámetro de la boquilla del enjuagador no supera los 25 mm; es inferior al de la salida de heces de las bolsas de ileostomía (35mm). Cuando el enjuagador no se está usando el cable de ducha al que va conectado queda oculto en el interior del mueble del baño. **El enjuagador de bolsa es imprescindible para dejarla limpia tras el vaciado.**
Disponibles el grifo especial con ducha extraíble (opcional).
- **ENCIMERA:** de forma curva sin esquinas de 90°, para evitar accidentes como clavarse una esquina en el estoma. La encimera tiene una superficie lo suficientemente **amplia que permite posar todos los productos de aseo y recambio** tales como: bolsa de ostomía, gases, pasta periestomal, tijeras, polvos secantes y otros productos. **Está al mismo nivel que el inodoro, encastrándolo, para evitar caídas de productos.**
- **ESPEJO:** El espejo grande en el que **poder verse el estoma** está colocado **a ras de la encimera**. Es grande e **imprescindible para verse el abdomen y facilitar el cambio de bolsa**, sobre todo, cuando es de una sola pieza. Además, no tiene ningún elemento en medio que dificulte verse bien, como un pulsador de cisterna.





BAÑOS PARA OSTOMIZADOS

WWW.LHC1.NET

BAÑOOSTOMIZADOS.COM

INFO@LHC1.NET

- **APLIQUES:** el aseo BañOstom® también **incluye** apliques como **jabonera** y **portarrollos de papel** higiénico, necesario para secar la boca de salida de la bolsa tras enjuagarla, así como **dos colgadores de bolso/ropa**.

MATERIAL: **TODO** el **gabinete completo** está fabricado con material compuesto sintético “**Superficie Sólida**” (*Solid Surface*) de uso sanitario y antibacteriano, para garantizar higiene, limpieza fácil, construcción sólida y resistente, juntas invisibles, uniformidad del color y versatilidad en ajustes de medidas personalizadas.

(NO en HPL sobre aglomerado, tablero aplacado, NO en fibra de vidrio que puede causar irritación y toxicidad, u otro material no adecuado, que se hincha con la humedad).

El color del mueble es el blanco.

- **MEDIDAS:** **725 mm** de ancho x **1625 mm** de altura total
 - El modelo **BañOstom® PEQUEÑO** tiene una **profundidad TOTAL** de **540 mm** en la parte superior borde de la encimera y de **365 mm** en la parte **inferior**.
 - El modelo **BañOstom® GRANDE**, tiene una **profundidad TOTAL** de **640 mm** en la parte superior borde de la encimera y de **470 mm** en la parte **inferior**

por lo cual ambos modelos **BañOstom®** son altamente recomendados en cuanto facilitan el **pasaje con las sillas de ruedas** en baños para movilidad reducida y en aseos accesibles.

La encimera con inodoro está colocada a la altura de **750 mm** desde el suelo.





BAÑOS PARA OSTOMIZADOS

WWW.LHC1.NET

BAÑOOSTOMIZADOS.COM

INFO@LHC1.NET

EL KIT DE BAÑOSTOM® INCLUYE:

- Mueble realizado **enteramente** con material sintético **Solid Surface** (igual al de los gráficos, fotos y planos facilitados) - **kit de 2 piezas** (top y base pie)
 - Piezas especiales de montaje
 - Enjuagador de bolsa / Disponibile el grifo especial con ducha extraible (opcional)
 - Espejo grande
 - Inodoro suspendido de cerámica
 - Cisterna empotrada
 - Bastidor para la cisterna empotrada
 - Pulsador remoto para cisterna empotrada
 - Portarrollos de papel higiénico
 - Dos perchas para bolso/ropa
 - Dispensador de jabón
-
- GABINETE: El inodoro está semi-separado, solo fijado a la pared y se puede colocar en un espacio abierto.
 - El kit de montaje debe ser instalado por personal cualificado.
 - **La instalación y el montaje están excluidos.**






BAÑOS PARA OSTOMIZADOS

WWW.LHC1.NET

BAÑOOSTOMIZADOS.COM

INFO@LHC1.NET

FICHAS TÉCNICAS

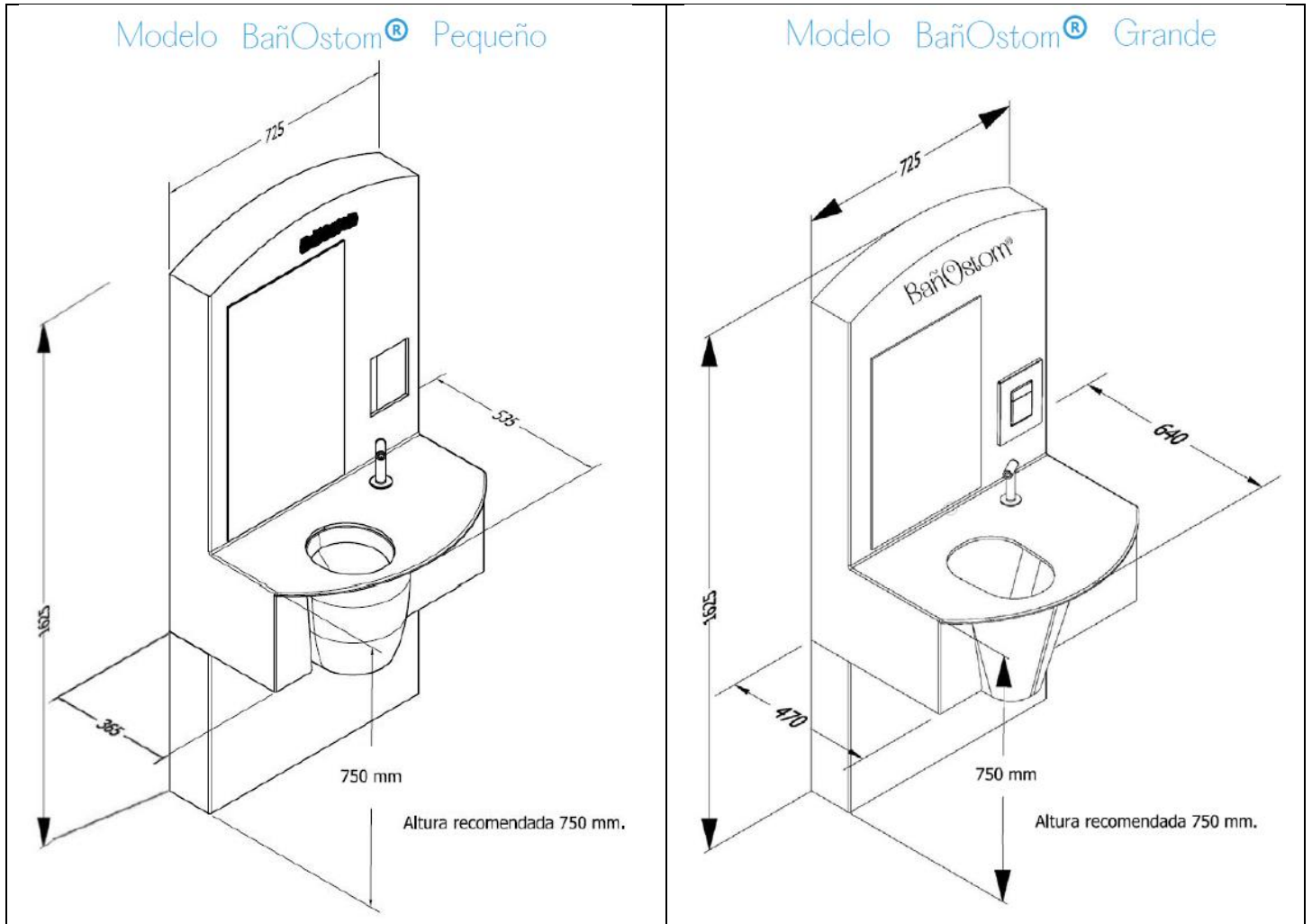

Se pueden evaluar ajustes de medidas, siempre y cuando sea posible, sin penalizar aspectos fundamentales, imprescindibles para el uso correcto del baño adaptados a personas ostomizadas.

La encimera con inodoro está colocada a la altura de **750 mm** desde el suelo.

Para cualquier aclaración, no dude en contactar con nosotros sin compromiso. Estaremos encantados de atenderle.



OFICINA PROPIEDAD INTELECTUAL UNIÓN EUROPEA - Registro Dibujos y Modelos Comunitarios EUIPO

- CERTIFICATE OF REGISTRATION / Concesión 015019294-0001 BañOstom® Grande
- CERTIFICATE OF REGISTRATION / Concesión 015019295-0001 EmptyMe® Grande
- CERTIFICATE OF REGISTRATION / Concesión 015019296-0001 BañOstom® Pequeño
- CERTIFICATE OF REGISTRATION / Concesión 015019297-0001 EmptyMe® Pequeño
- CERTIFICATE OF REGISTRATION / Concesión 015014307-0001 GRIFO EmptyMe®

EMPTYME®

BAÑOOSTOM®